

Aufbereitung der smartwipes Spenderdose

1

Deckel vom Behälter entfernen.




2

Deckel- und Behälterinnenseite, Tuchabrieb und Reservoir mit einem getränkten Desinfektionstuch aus- bzw. abwischen (bitte Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten).



3

Trocknen lassen.

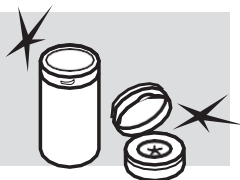

4

Befüllten Beutel in den Behälter stellen und unterhalb der Schweißlinie aufschneiden. Behälterdeckel auflegen. Die Desinfektionstücher sind gebrauchsfertig.

