

**Produktbeschreibung:**

Saugstarke, fadenfreie Mulltupfer aus Verbandmull, 100 % Baumwolle.

**Anwendungsbereich / Indikation:**

Die Tupfer sind unsteril verpackt und dienen zur allgemeinen Wundversorgung. Vor Anwendung müssen die Mulltupfer mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden.

**Produktvarianten:**

im Beutel:

GRÖSSE	REF	PZN (BEUTEL)	GTIN	STÜCK/ BTL	BTL/ KTN
5 x 6 cm, erbsengroß	733023SD / 203203	-	-	500	72
8 x 8 cm, haselnussgroß	733021SD / 203205	-	-	500	72
15 x 15 cm, walnussgroß	733041SD / 203207	-	-	500	40
20 x 20 cm, pflaumengroß	733051SD / 203208	-	-	2 x 200	30

**Warnhinweise / Kontraindikationen:**

Das Produkt darf bei einer bestehenden Allergie gegen das Material nicht angewendet werden.

Das Produkt muss vor dem Kontakt mit offenen Wunden mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden.

Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.

Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

**Hinweis zur Sterilisation:**

Das Produkt darf mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden.

**Sterilisationsempfehlung:**

Bezüglich der Sterilisation empfehlen wir die Sterilisationstemperatur von Dampf bei 134 °C für einen Zeitraum von ca. 8 Minuten.

Bitte beachten Sie die speziellen Anweisungen des Herstellers des Sterilisationsgerätes und die Empfehlungen der nationalen und internationalen Sterilisationsstandards, um eine effektive und sichere Sterilisation zu gewährleisten.

**Hinweise zur Lagerung:**

Das Produkt muss vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Normative und regulative Anforderungen:**

Medizinprodukt der Klasse / Regel: I / 4 (Anhang VIII Verordnung (EU) 2017/745)

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III (Verordnung (EU) 2017/745)

Das Produkt enthält keine Substanzen gemäß REACH.

**Kennzeichnung:**

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417 und mit CE-Zeichen auf allen Verpackungsstufen.

**eCI@ss:**

34-21-01-01