



CLEVER QUALITY

Spendereimer smartwipes Dry

Vorbereitung:

Öffnen Sie die Nachfüllpackung. Stellen Sie die trockene Rolle direkt in den Leereimer. Füllen Sie nun gemäß Abschnitt Füllvorschriften das entsprechende Produkt auf die Rolle und tragen Sie den Produktnamen, das Verfallsdatum und Chargen-Nr. auf dem bei den Trockentüchern mitgelieferten Klebeetikett. Klebeetikett auf dem Eimer aufbringen. Nach einer Einwirkzeit von 30 - 60 Minuten sind die Desinfektionstücher gebrauchsfertig. Entnehmen Sie aus der Rollenmitte das erste Tuch und ziehen Sie es durch die Spenderöffnung des Deckels. Verschließen Sie Eimer und Entnahmestelle danach sorgfältig. Haltbarkeit nach dem Öffnen: 28 Tage.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass für Fremdflüssigkeiten keine Haftung übernommen und deren Wirksamkeit nicht garantiert werden kann.



Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Straße 16
D-77656 Offenburg

Vertrieb durch: OMNIDENT GmbH ·
Gutenbergring 5 · D-63110 Rodgau

Füllvorschriften:

Bitte füllen Sie die entsprechenden Mengen auf die Rolle:

- **Smartzid Flächendesinfektion**
Tränkmenge: 2,2 L
- **smartzBiozid**
Tränkmenge: 2,0 L

Die Produktsicherheit und Wirksamkeit ist für smartwipes Dry nur mit diesen Flüssigkeiten und entsprechenden Mengen gewährleistet.

Das finale Produkt ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen/ Produktinformationen auf dem Etikett der entsprechend verwendeten Flüssigkeit.



gültig für finales, korrekt
angesetztes Produkt



+EOMN111958K

Aufbereitung der Spenderbox

Deckel vom Behälter entfernen.



Deckel- und Behälter-Innen-
seite, Tuchabriss und Reservoir
mit einem getränkten Des-
infektionstuch aus- bzw. ab-
wischen (Einwirkzeit des Des-
infektionsmittels beachten).



Behälter und Deckel
trocknen lassen.



Neubefüllung des gereinigten
Behälters: folgen Sie den links
unter „Vorbereitung“ beschrie-
benen Arbeitsschritten.

